

CE

Drug-PIN DiGA

Gebrauchsanleitung Drug-PIN DiGA

Symbole	4
Allgemeine Produkt und Herstellerinformationen	5
Handelsname des Medizinproduktes	5
Zweckbestimmung	5
Anschrift des Herstellers	6
Ausstellungsdatum der Gebrauchsanweisung.....	6
Produktbeschreibung.....	7
Indikation	7
Kontraindikation und Ausschlüsse	8
Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen	8
Dauer und Häufigkeit der Nutzung	8
Nutzungsvoraussetzung	8
Wie bekomme ich den Nutzungscode?	9
Funktionsbeschreibung	9
A. Herunterladen und Installation	9
B. Registrierung und Aktivierung.....	10
C. Medikationsplan Scannen	11
D. Profil Anlegen.....	12
E. Übersicht.....	13
Zeitintervalle / Einnahmezeiten	13
Medikationsübersicht	14
Medikationskarte	15
Kontraindikationen	16
Aktuelle Medikation	17
Einnahmehinweise	18
Medikamentenerinnerung	19
F. Medikationsplan Anzeigen	20
G. Medikationsliste und Selbstmedikation	20

H. Ärztefreigabe.....	22
I. Menü und weitere Funktionen	23
Weitere Informationen	23
Weitere Funktionen	24
Feedback	24
App Aktivieren	24
Passwort ändern	25

SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
	CE-Zeichen (Communauté Européenne). Ein Produkt mit diesem Zeichen erfüllt die Anforderungen der entsprechenden EU-Verordnung, d. h. der geltenden europäischen Norm
	Hersteller
	Ist ein Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	Achtung

Drug-PIN DiGA

ALLGEMEINE PRODUKT- UND HERSTELLERINFORMATIONEN



Diese Gebrauchsanweisung dient der korrekten Anwendung der Drug-PIN DiGA. Bitte lesen Sie sich diese Informationen genau durch und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen. Bei Fragen zum Inhalt dieser Gebrauchsanweisung oder zur Anwendung der Drug-PIN DiGA wenden Sie sich bitte an info@drug-pin.de.

HANDELSNAME DES MEDIZINPRODUKTES

Drug-PIN App

ZWECKBESTIMMUNG

Die Drug-PIN DiGA ist ein interaktives onlinebasiertes, CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt. Ihr/e Arzt/Ärztin hat Ihnen mehr als drei Medikamente verschrieben und den sogenannten Bundeseinheitlichen Medikationsplan (BMP) erstellt. Je mehr Medikamente gleichzeitig eingenommen werden, desto größer ist die Möglichkeit, dass es Nebenwirkungen gibt oder dass sich die Wirkung verringert oder verstärkt. Um ein optimales Therapieergebnis zu erzielen und Nebenwirkungen zu vermeiden, haben Sie durch die Verordnung der Drug-PIN DiGA die Möglichkeit bekommen, den QR-Code Ihres Medikationsplans einzuscannen und zusätzlich Angaben zu Lebensgewohnheiten und frei verkäuflichen Medikamenten vorzunehmen. Mittels der zugehörigen Web-Anwendung analysiert Ihr Arzt / Ihre Ärztin Ihre Medikation im Zusammenhang mit Ihrem Lebensstil und ggf. Ihrer Laborwerte. Danach trifft Ihr/e Arzt/Ärztin auf Basis einer personalisierten Auswertung die Entscheidung über mögliche Therapieoptimierungen. Die Drug-PIN DiGA unterstützt Sie durch Hinweise zur Einnahme, wenn gewünscht, auch durch Erinnerungen an Ihre Medikamenteneinnahme. Sie haben Ihre Medikation und alle relevante Zusatzdaten stets zur Hand und können entscheiden, wem (z.B. welchen Fachärzten) Sie diese Daten zur Verfügung stellen. Sie haben mit der Drug-PIN DiGA auch die Möglichkeit, Ihren Bundeseinheitlichen Medikationsplan als eMedikationsplan zu exportieren.

Ausführliche Informationen zu Drug-PIN DiGA (Digitale Gesundheitsanwendung) finden Sie unter <https://www.drug-pin.de/>.

ANSCHRIFT DES HERSTELLERS



Drug-PIN GmbH
Storkower Str. 139 b
10407 Berlin

Kontakt: info@drug-pin.de



Jahr der Herstellung: 2022

AUSSTELLUNGSDATUM DER GEBRAUCHSANWEISUNG

V1.0, Datum: 30.04.2022

Die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung findest du auch auf unserer Website:

<https://www.drug-pin.de/Gebrauchsanweisung.html>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der Drug-PIN DiGA können Patientinnen und Patienten Ihren Bundeseinheitlichen Medikationsplan eigenständig einscannen und zusätzlich weitere freiverkäufliche Medikamente und Lebensgewohnheiten, wie Rauchen, Kaffee- und Alkoholkonsum hinzufügen. Außerdem kann auf Basis der Analyse eine Einnahmeerinnerung aktiviert werden. Die Drug-PIN DiGA analysiert die Eingaben und gibt Hinweise zu Einnahme bzw erforderlicher Rücksprache mit dem Arzt bzw. der Ärztin. Hierdurch werden Patientinnen und Patienten befähigt, sich selbst um ihre Medikation und geeignete Lebensstilanpassungen zu kümmern und damit den Therapieerfolg zu beeinflussen. Die Einnahme- und Medikationshinweise sowie aufgezeichnete Nebenwirkungen helfen beim nächsten regulären Arztkontakt die Medikation zu kontrollieren und ggf. zu optimieren, um Nebenwirkungen und Interaktionen zu minimieren.

Zusätzlich hilft die Drug-PIN DiGA Ärztinnen und Ärzten bei der effizienteren und transsektoralen Patient-Behandler-Kommunikation. Durch umfassende, stets aktuelle Dokumentation der Medikation und zusätzliche, die Wirkung der verordneten Medikamente beeinflussenden Faktoren, steht eine fundierte Analyse der Medikation bereit. Der/die Patient*in kann den Arzt gezielt auf die Analyse ansprechen. Die Ärztinnen und Ärzte können sich über die, nur für Ärzte und Ärztinnen nutzbare, webbasierte Version der Drug-PIN DiGA die Analyse und die personalisierte Medikationsvorschläge informieren. Die Behandler erhalten Vorschläge zur Therapieoptimierung, den sie berücksichtigen können. Patient*innen können selbst entscheiden, welchem Arzt, welcher Ärztin sie Zugriff auf die personalisierte Analyse und die Möglichkeit zur Therapieoptimierung gewähren.

INDIKATION

Drug-PIN ist ein registriertes Medizinprodukt für Patienten*innen, die mehr als drei Medikamente dauerhaft einnehmen und die einen Bundeseinheitlichen Medikationsplan (BMP) erhalten haben.

Vor der Anwendung verordnet Ihnen eine Ärztin oder ein Arzt die Drug-PIN DiGA, weil diese Digitale Gesundheitsanwendung speziell für Ihre gesundheitliche Situation geeignet ist und zu einer Therapieverbesserung führen kann.

KONTRAINDIKATIONEN UND AUSSCHLÜSSE



Drug-PIN bietet keine medizinische Diagnose oder ärztliche Behandlung, sondern erstellt nach Einscannen des Bundeseinheitlichen Medikationsplanes eine Analyse der Medikation und gibt Hinweise zu Einnahme und Lebensstil mit dem Ziel der Therapieverbesserung. Drug-PIN ist ein registriertes Medizinprodukt für Patienten*innen, die mehr als drei Medikamente dauerhaft einnehmen und die einen Bundeseinheitlichen Medikationsplan (BMP) erhalten haben. Es kann einen Arztbesuch nicht ersetzen.

SICHERHEITSHINWEISE UND NEBENWIRKUNGEN



Drug-PIN ersetzt keinen Arzt oder Therapeuten.
Eine Änderung bestehender Medikationen und/oder Behandlungen darf nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt/Psychotherapeuten erfolgen. Sie sollten Ihren Arzt kontaktieren, wenn die Drug-PIN DiGA dir nach Analyse Ihrer Medikation Hinweise/Warnungen ausgibt, die Ihnen Bedenken bereiten.

Es sind keine Nebenwirkungen in der Nutzung von Drug-PIN bekannt.

DAUER UND HÄUFIGKEIT DER NUTZUNG

Nutzen Sie das Einlesen und Analysieren Ihres Medikationsplan **bei Bedarf**, z.B. wenn Ihr Arzt Ihre Medikation ändert und Sie einen neuen bundeseinheitlichen Medikationsplan erhalten.

Nutzen Sie die Medikamentenübersicht **regelmäßig**, um den Überblick über Ihre Medikamente zu behalten und die Funktion der Medikamentenerinnerung zu verwenden.

NUTZUNGSVORAUSSETZUNG

Sie benötigen ein Smartphone mit Internetzugang.
Drug-PIN ist derzeit ab iOS 12.0 kompatibel. Wir empfehlen Android ab Version 9.0 und höher.

WIE BEKOMME ICH DEN NUTZUNGSCODE?

Drug-PIN ist eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) und damit ein zertifiziertes Medizinprodukt nach deutschem Medizinproduktegesetz. Die Kosten für die Nutzung von Drug-PIN übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen. Um die Nutzung von Drug-Pin freizuschalten, benötigst du einen Freischaltcode.

Schritt 1 – Wenn Sie mehr als drei Medikamente dauerhaft einnehmen und Ihr Arzt Ihnen einen Bundeseinheitlichen Medikationsplan erstellt hat, können Sie ein Rezept für die Drug-PIN DiGA von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt erhalten.

Schritt 2 - Reichen Sie das Rezept bei Ihrer Krankenkasse ein.

Schritt 3 - Sie erhalten von Ihrer Krankenkasse einen 16-stelligen Aktivierungscode.

Schritt 4 - Mit diesem Code können Sie die Drug-PIN DiGA aktivieren.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Um die Drug-PIN DiGA zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor und halten Sie den von der Krankenkasse bereitgestellten Code bereit. Sollten Sie noch keinen Aktivierungscode haben, können Sie die App 10 Tage kostenlos testen.

A. HERUNTERLADEN UND INSTALLATION

Schritt 1 – Je nachdem, ob Sie ein Android- oder Apple-Gerät benutzen, laden Sie die Drug-PIN DiGA aus dem Google Play Store oder dem Apple Store herunter:

Drug-PIN im Google Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.drugpin.diga>

Drug-PIN im Apple App Store

<https://apps.apple.com/de/app/drug-pin/id1581072442>

Schritt 2 – Suchen Sie nach "Drug-PIN" und installieren Sie die App (alternativ können Sie die hier abgebildeten QR-Codes einscannen und so direkt zur App gelangen).





B. REGISTRIERUNG UND AKTIVIERUNG

Schritt 1 – Geben Sie auf der Login Seite Ihre E-Mail und Ihr gewünschtes Passwort ein.

Schritt 2 – Validieren Sie Ihre Registrierung, indem Sie auf den Link klicken, der Ihnen an Ihre eingeegebene E-Mail-Adresse zugeschickt wurde.


Schritt 3 – Melden Sie sich über die Login Seite der App an.

Schritt 4 – Beim erstmaligen Nutzen wird Ihnen eine Einführung angezeigt, die Ihnen eine paar allgemeine Hinweise zur App gibt. Lesen Sie sich diese durch und akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung.

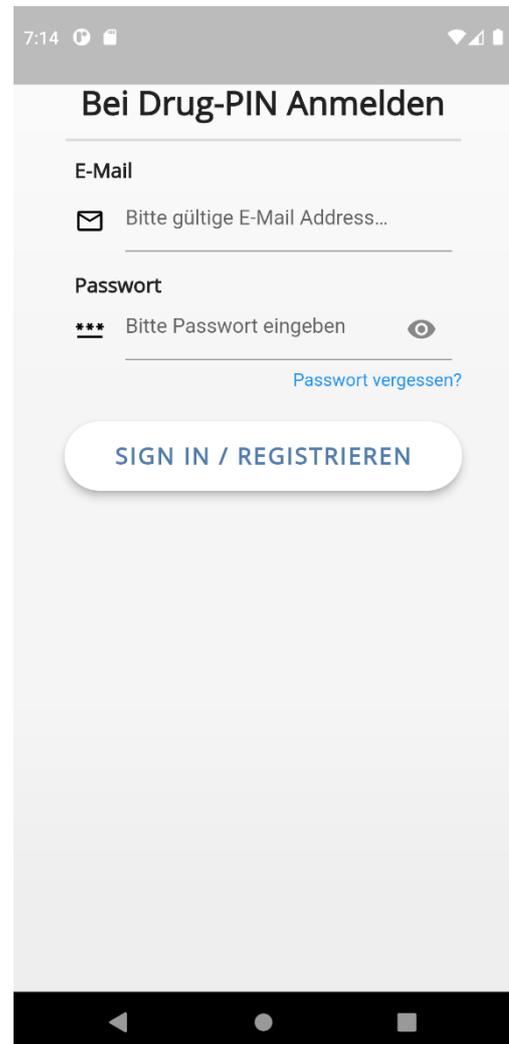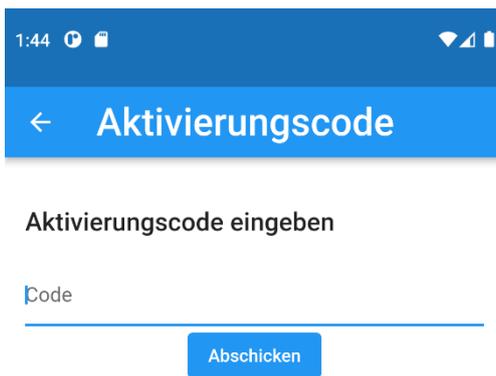

Schritt 5 – In der App, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte, um das Burgermenü zu öffnen und wählen Sie **App aktivieren** aus.

Schritt 6 – Geben Sie Ihren Aktivierungscode, den Sie von der Krankenkasse erhalten haben.

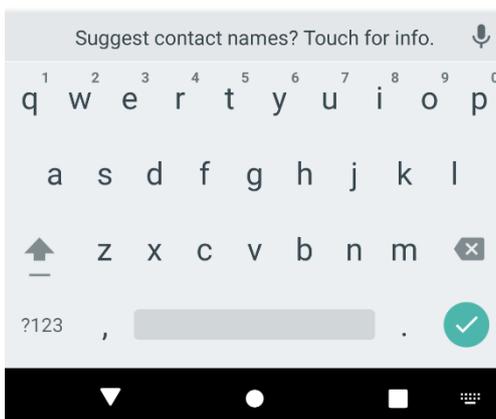

C. MEDIKATIONSPLAN EINSCANNEN

Schritt 1 – Klicken Sie in der Menüleiste auf das Kamera-Symbol (Scannen).


Schritt 2 – Klicken Sie auf **Barcodescan starten**.

Schritt 3 – Zum Scannen die Kamera über den Code halten.

Schritt 4 – Der eingescannte Medikationsplan erscheint.

Schritt 5 – Nutzen Sie die verschiedenen Funktionen der Drug-PIN zur Analyse Ihrer Medikation.

Schritt 6 – Planen Sie den nächsten Arztbesuch und besprechen Sie die Analyse.

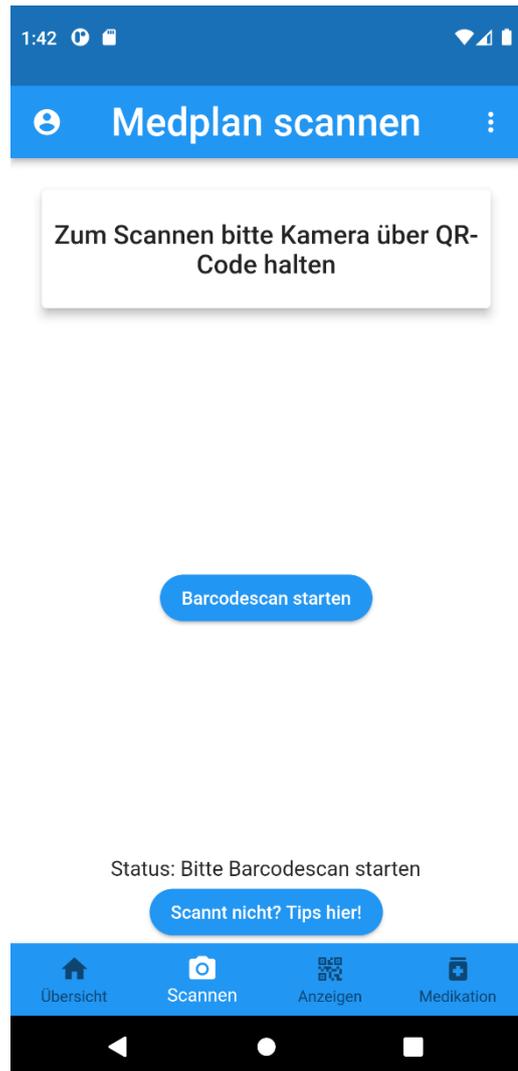

Drug-PIN ersetzt nicht den direkten Kontakt zu Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt! Bitte kontaktieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, sobald Sie Fragen oder Schwierigkeiten haben. Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihrer Ärztin oder Ihres Arztes.

D. PROFIL ANLEGEN

Im Profil werden Ihre persönlichen und gesundheitlichen Daten hinterlegt und gespeichert. Einige dieser Daten werden in die Bewertung Ihrer aktuellen Medikation eingezogen, da gewisse Laborwerte und Angewohnheiten die Medikamentenverträglichkeit beeinflussen können.



Schritt 1 – Klicken Sie auf das Profilsymbol oben links, um Ihr Profil zu öffnen.

Schritt 2 – Füllen Sie Ihre persönlichen Daten in den Tabs **Grunddaten** und **Kontaktdaten** aus.

Schritt 3 – Einige Daten sind ggf. bereits durch das Einlesen Ihres Medikationsplans vorausgefüllt.

Schritt 3 – Füllen Sie Ihre gesundheitlichen Daten im Tab **Maße & Gewohnheiten** aus.

Schritt 4 – Drücken Sie nach Eingabe Ihrer Größe und Ihres Gewichts aus dem Knopf für die BMI Berechnung.

Schritt 5 - Füllen Sie Ihre weiteren gesundheitlichen Daten in den Tabs **zu Beachten** und **Labortwerte** aus.



Achtung! Bitte achten Sie bei den gesundheitlichen Daten auf Genauigkeit, da diese in die Auswertung Ihres Medikationsplans einfließen. Wenn Sie einen Wert nicht kennen, lassen Sie diesen zunächst aus und fragen Sie bei Bedarf Ihren Arzt danach.

E. ÜBERSICHT

In der Übersichtsseite bekommen Sie die wichtigsten Daten und Funktionen auf einer Seite angezeigt. Diese fungiert nach erstmaligem Einrichten der App als Ihre Startseite beim neuen Öffnen der App und ist in zwei Bereiche unterteilt. Im oberen Bereich finden Sie die Medikationsübersicht, die Ihnen einen Überblick über all Ihre erfassten Medikamente verschafft und im unteren Bereich werden die Medikamente für das aktuelle Zeitintervall angezeigt.

Zeitintervalle / Einnahmezeiten

Bundeseinheitliche Medikationspläne und somit auch die Drug-PIN App teilt Ihre Medikation in vier Zeitintervalle entsprechend der üblichen Einnahmezeiten ein: Morgens, Mittags, Abends, Nachts.

Diese Zeiten bestimmen u.a. welche Medikamente auf der Übersicht unter „Aktuelle Medikation“ angezeigt werden und wann Ihnen, falls gewünscht, eine Medikamentenerinnerung angezeigt wird.

Die voreingestellten Einnahmezeiten in der Drug-PIN App sind wie folgt:


Morgens – 7:00 Uhr

Mittags – 12:00 Uhr


Abends – 16:00 Uhr

Nachts – 20:00 Uhr

Sie können diese Zeiten jederzeit individuell anpassen; entweder für das aktuelle Zeitintervall über die Aktuelle Medikation in der Übersicht (siehe Abschnitt **Aktuelle Medikation**) oder für alle Zeitintervalle in den entsprechenden Tabs der Medikationskarte (siehe Abschnitt **Medikationskarte**).

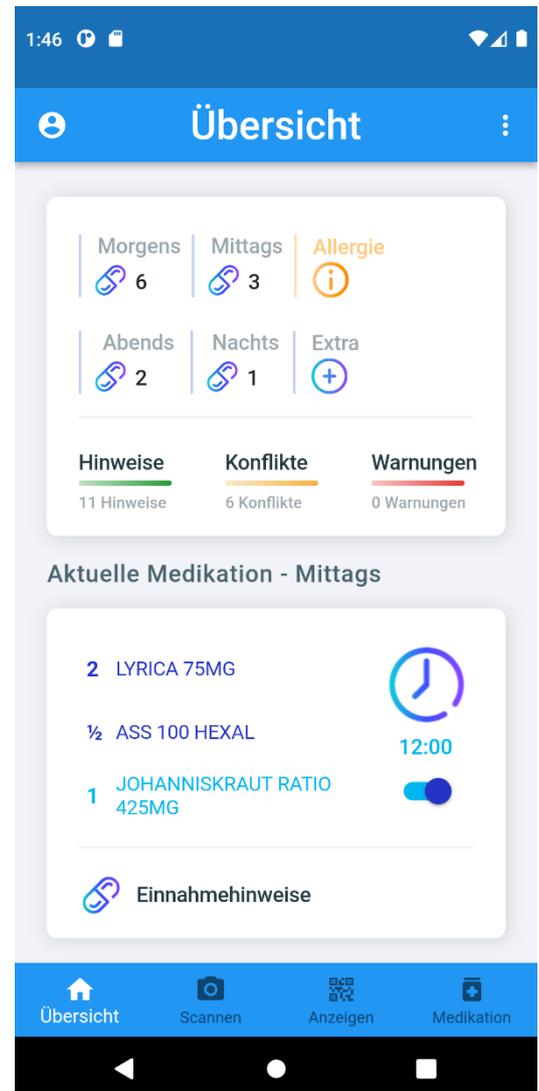

Medikationsübersicht

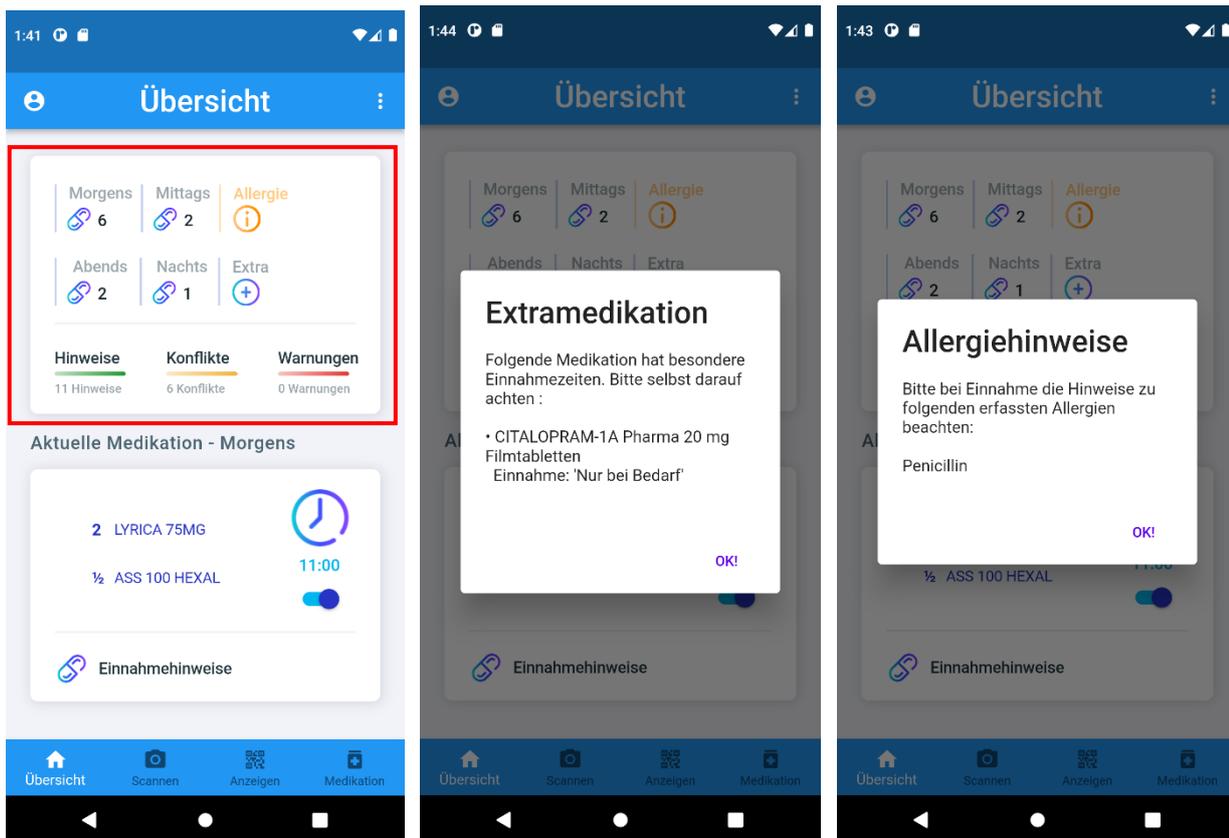

Im oberen Bereich der Drug-PIN App Übersicht, sehen Sie eine Aufzählung Ihrer Medikamente. Für jede Einnahmezeit (Morgens, Mittags, Abends, Nachts), wird gelistet wie viele Medikamente dort für Sie eingetragen sind. Im Falle von zusätzlich erfasster Selbstmedikation (**siehe G. MEDIKATIONSLISTE UND SELBSTMEDIKATION**), wird diese hier mit aufgelistet. Über die Pillensymbole der entsprechenden Zeitintervalle können Sie die Medikationskarte aufrufen, in der Sie einen Überblick über all Ihre erfassten Medikamente und die entsprechenden Einnahmezeiten erhalten (siehe Abschnitt **Medikationskarte**).

Medikamente, die außerhalb der üblichen Einnahmezeiten und z.B. nur wöchentlich eingenommen werden, werden als sogenannte Extramedikationen neben erfasst. Diese können über das Pluszeichen aufgerufen werden.

Außerdem werden in diesem Bereiche Allergiehinweise und Kontraindikationen (siehe Abschnitt **Kontraindikationen**) angezeigt. Zum Anzeigen der Allergiehinweise klicken Sie auf das orange Informationssymbol, das mit **Allergie** beschriftet ist. Die Allergiehinweise beziehen sich dabei auf von Ihnen im Profil hinterlegte Allergien.

Medikationskarte



Die Medikationskarte kann über die Pillensymbole der einzelnen Zeitintervalle in der Übersicht aufgerufen werden. Die Medikationskarte ist entsprechend der Einnahmezeiten in vier Tabs unterteilt und öffnet sich auf dem Tab der Zeit, über die sie aufgerufen wurde (Morgens, Mittags, Abends oder Nachts). Wenn Sie die Medikamente einer anderen Einnahmezeit ansehen müssen, können Sie auf den entsprechenden Tab klicken und dorthin zu wechseln.

Hier werden in jedem Tab die Medikamente für die entsprechende Einnahmezeit sowie die eingerichtete Erinnerungszeit angezeigt. Durch den Medikationsplan eingelesene Medikamente sind dabei dunkelblau, während erfasste Selbstmedikationen hellblau dargestellt werden.

Im unteren Bereich finden Sie ein Uhrensymbol, über das die Einnahmezeit angepasst werden kann, sowie einen Kippschalter, der die Erinnerungsfunktion an und aus schaltet (mehr dazu im Abschnitt **Medikamentenerinnerung**).

Kontraindikationen

Hinweise
7 Hinweise

Konflikte
4 Konflikte

Warnungen
0 Warnungen

Ebenfalls im oberen Bereich der Übersicht und unterhalb der Zeitintervalle befinden sich die erkannten Kontraindikationen. Hierbei handelt es sich um mögliche Hinweise (grün), Konflikte (gelb) und Warnungen (rot) die das Drug-PIN System aufgrund Ihres Medikationsplan und Ihrer gesundheitlichen Daten ermittelt hat. Es wird jeweils aufgelistet, wie viele Hinweise, Konflikte oder Warnungen gefunden wurden und insofern für eine Stufe mindestens eine Indikation gefunden wurde, kann diese über das Anklicken der entsprechenden Indikationsstufe aufgerufen werden. Wenn also z.B. angezeigt wird, dass sieben Hinweise für Sie gefunden wurde, können Sie auf den Block „Hinweise“ klicken und Ihnen werden die entsprechenden Hinweise detailliert angezeigt.

1:43

← **Hinweise**

Wichtiger Hinweis

Die folgenden Hinweise, Konflikte und Warnungen dürfen niemals zu eigenständigen Medikationsänderungen führen. Bitte suchen sie das Gespräch mit ihrem Arzt, um die Effekte ganzheitlich einzuordnen.

Ramipril - Tamsulosin hydrochlorid

Blutdrucksenkende Mittel können die hypotensive Wirkung von Hypotonie-assoziierten Mitteln verstärken.

Amitriptylin hydrochlorid - Acetylsalicylsäure

Antidepressiva (trizyklisches, tertiäres Amin) können die blutplättchenhemmende Wirkung von Aspirin verstärken.

Ramipril - Amitriptylin hydrochlorid

Viele Psychotherapeutika und ZNS-aktive Mittel (z. B. Anxiolytika, Beruhigungsmittel, Hypnotika, Antidepressiva, Antipsychotika, Opioide, Alkohol, Muskelrelaxantien) zeigen blutdrucksenkende Wirkungen, insbesondere während des Beginns



Achtung! Die Kontraindikationen gelten als eine erste Einstufung Ihrer Medikation, ersetzen aber nicht die Expertise und Beratung eines Arztes. Sollten Sie rote oder viele gelbe Kontraindikationen haben, wird geraten diese mit Ihrem Arzt zu besprechen.

Aktuelle Medikation


Im unteren Bereich der Übersicht wird die aktuelle Medikation angezeigt. Die hier angezeigten Medikamente richten sich nach den eingestellten Einnahmezeiten. Dabei wird ein Zeitintervall immer bis zum Erreichen der nächsten Einnahmezeit angezeigt.

Es werden immer die Namen sowie Mengen ihrer aktuell einzunehmenden Medikation angezeigt. Dabei sind Medikamente aus dem Medikationsplan in dunkelblau dargestellt, während ggf. erfasste Selbstmedikation (siehe **G. MEDIKATIONSLISTE UND SELBSTMEDIKATION**) in hellblau dargestellt werden.

Außerdem kann hier über die Uhrzeit und das Uhrensymbol die Einnahmezeit für das entsprechende Zeitintervall geändert und über den Kippschalter die Medikamentenerinnerung eingeschaltet werden. Mehr dazu im Abschnitt **Medikamentenerinnerung**.

Einnahmehinweise


Über das Pillensymbol in der Aktuellen Medikation können sie Einnahmehinweise für Ihren gesamten Medikationsplan aufgerufen werden. Hierbei handelt es um Hinweise, die bei Einnahme Ihrer Medikamente zu beachten sind, die z.B. in der Packungsbeilage Ihrer Medikamente gelistet sind.

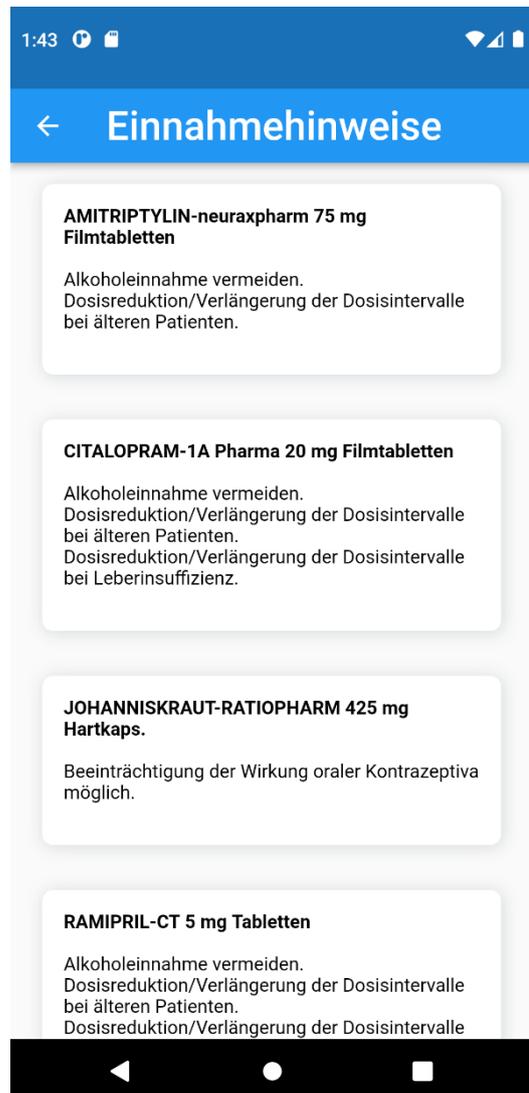

Medikamentenerinnerung



Mit der Funktion der Medikamentenerinnerung haben Sie die Möglichkeit sich zu den vier Einnahmezeiten morgens, mittags, abends und nachts zu Ihrer gewünschten Zeit von der Drug-PIN erinnern zu lassen. Hierbei haben Sie die Möglichkeit sich an einer oder mehreren Einnahmezeiten erinnern zu lassen.

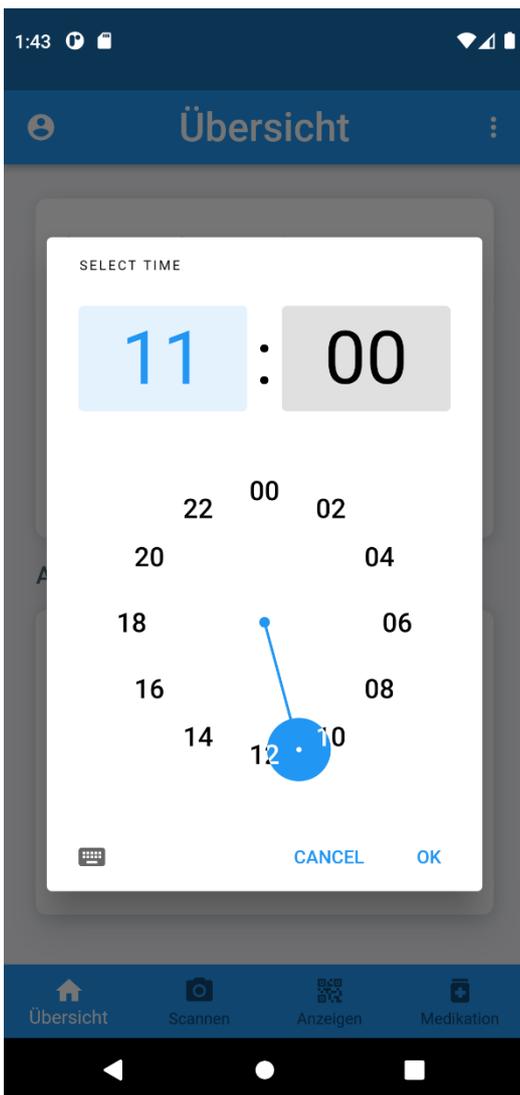

Schritt 1.a – Wenn Sie die Zeit für das aktuelle Zeitfenster anpassen möchten, öffnen Sie die **Medikamentenübersicht**.

Schritt 1.b – Wenn Sie die Zeit für ein beliebiges Zeitfenster oder mehrere Zeitfenster anpassen möchten, öffnen die **Medikationskarte**.

Schritt 2 – Klicken Sie auf die angezeigte **Uhrzeit** oder das **Uhrensymbol**.

Schritt 3 – Wählen Sie im geöffneten Fenster die Zeit aus oder klicken Sie auf das Tastatur Symbol, um diese manuell einzugeben.

Schritt 4 – Schließen Sie das Fenster mit **OK**.

Schritt 5 – Klicken Sie auf den **Kippschalter** unterhalb (Übersicht) oder neben (Medikationskarte) der Uhrzeit, um die Medikamentenerinnerung zu aktivieren.

Schritt 6 – Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Einnahmezeiten, für die Sie eine Erinnerung wünschen.

Die Medikamentenerinnerung kann jederzeit durch das Betätigen des Kippschalters für die entsprechende Einnahmezeit an- und ausgestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass die ausgewählten Zeiten der Zeitintervalle sich nicht überschneiden und immer zeitlich nacheinander liegen müssen. D.h. dass z.B. die **Abends** Zeit nicht vor der **Mittags** Zeit liegen darf.

F. MEDIKATIONSPLAN ANZEIGEN

Auf der „Anzeigen“, die Sie über das Fußleisten Menü aufrufen können, finden Sie den QR-Code Ihres eingelesenen Medikationsplans. Bei jedem Einlesen eines neuen Plans über die „Scannen“ Seite wird der QR-Code hier entsprechend aktualisiert. Das letzte Einlesen können Sie dem angezeigten Scandatum entnehmen.



Hier haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, über die blauen Buttons ein paar Funktionen aufzurufen.

- Über **Medikationsplan zeigen**, können Sie ihren Medikationsplan als PDF auf Ihrem Gerät anzeigen und speichern.

- Über **Beispielplan laden** können Sie die App mit unseren Beispieldaten testen bevor Sie ihren eigenen Medikationsplan einlesen.


- Mit der **Ärztefreigabe** Funktion können Sie ihren gewünschten Ärzten Ihre Mediationsdaten zugänglich machen (mehr dazu unter **H. ÄRZTEFREIGABE**).



G. MEDIKATIONSLISTE UND SELBSTMEDIKATION

Über **Medikation** in der Fußleiste können Sie sich eine Auflistung all Ihrer Medikationen ansehen. Hierbei werden Medikamente, die über Ihren Medikationsplan eingelesen wurden in lila angezeigt, während die Selbstmedikation, die Sie hier hinterlegen können in hellblau dargestellt werden.

Klicken Sie auf das Pfeilsymbol eines Medikaments, um sich die entsprechenden Wirkstoffe anzeigen zu lassen.

Falls Sie zusätzlich zu den Medikamenten Ihres Medikationsplans weitere Medikamente wie z.B. Schmerzmittel einnehmen, können Sie diese hier als Selbstmedikation erfassen. Diese werden bei der Auswertung Ihrer Medikation und dem Anzeigen möglicher Kontraindikationen mit einbezogen.

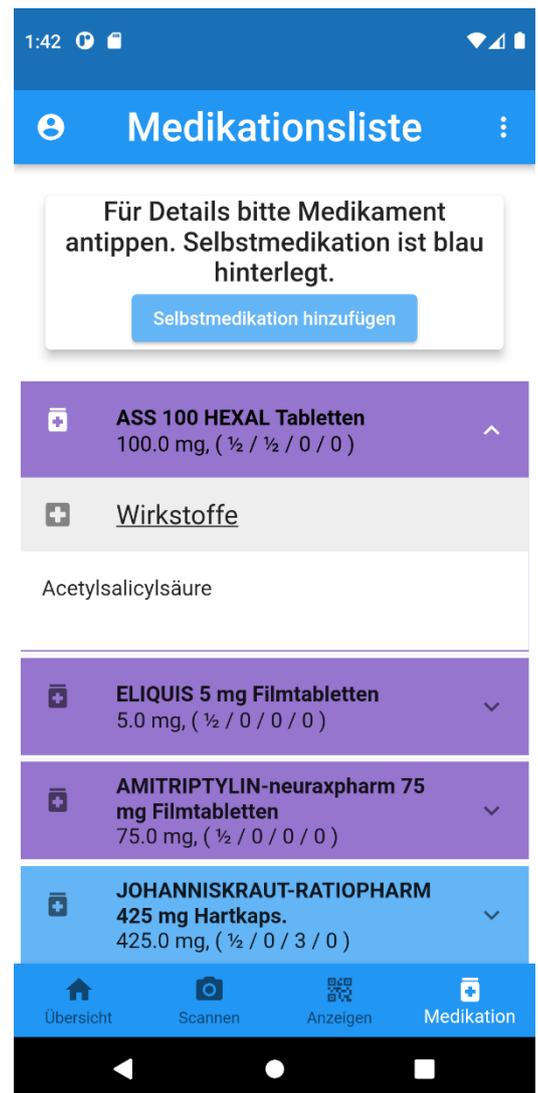

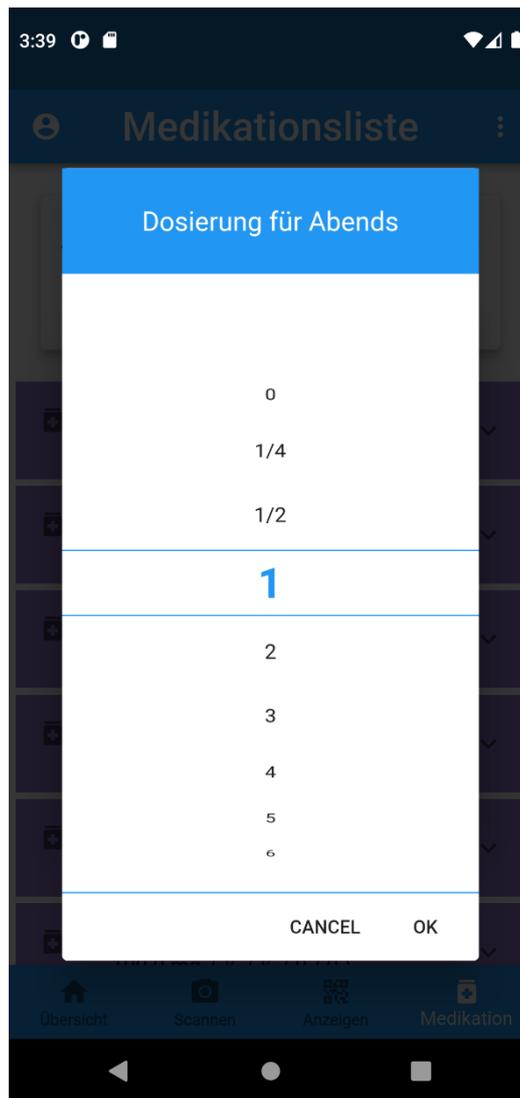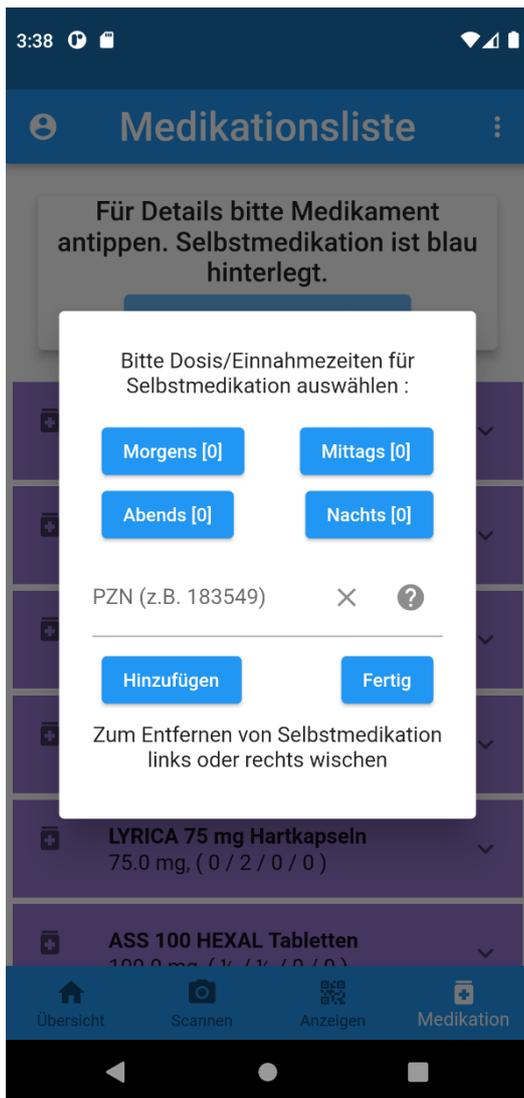

Schritt 1 – Klicken sie **auf Selbstmedikation hinzufügen**.

Schritt 2 – Im geöffneten Fenster, Klicken Sie auf die gewünschte Einnahmezeit (Morgens, Mittags, Abends oder Nachts) und wählen Sie Ihre Dosierung aus.

Schritt 3 – Geben Sie im **PZN** Feld die PZN Nummer ihres Medikaments ein. Diese finden Sie für gewöhnlich auf der Verpackung, z.B. unterhalb des Barcodes.

Schritt 4 – Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Schritt 5 – Falls Sie weitere Medikamente hinzufügen wollen, wiederholen Sie Schritt 2-4. Anschließend klicke Sie auf **Fertig**.

Ihre Selbstmedikation wird Ihnen nun unterhalb Ihrer anderen Medikamente in hellblau angezeigt und erscheint ebenfalls in der Übersicht, sowie der Medikationskarte.

Falls Sie die Selbstmedikation wieder löschen möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf der entsprechenden Medikation nach rechts wischen.

H. ÄRTZEFREIGABE

Über die Ärztefreigabe können Sie Ihren gewünschten Ärzten Ihre in der Drug-PIN App gespeicherten Daten zugänglich machen. Dies ermöglicht Ihrem Arzt mögliche Kontraindikationen oder Hinweise zu Ihrem Medikationsplan zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Achtung, nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie der eingetragenen Person Zugang zu Ihren erfassten medizinischen Daten gewähren wollen.

1:44

← **Ärztefreigabe**

Verwalten sie hier Ärzte, die Medikationsplan-Zugang haben. Bitte beachten sie Datenschutz- und Nutzungsbedingungen

Doktorname
Doktor 1

E-mail Adresse

Freigabe **Löschen**

Neue Arzt-Freigabe

Schritt 1 – Gehen Sie über die Fußleiste auf die **Anzeigen** Seite.

Schritt 2 – Klicken Sie hier auf den Button **Ärztefreigabe**.

Schritt 3 – Klicken Sie auf den Button **Freigabe hinzufügen**.

Schritt 4 – Tragen Sie den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres gewünschten Arztes ein.

Schritt 5 – Bestätigen Sie die Freigabe durch Anklicken des **Freigabe** Kästchens.

Schritt 6 – Ihr Arzt bekommt nun eine E-Mail mit einem Kurzbericht über die Drug-PIN seitige Auswertung Ihres Medikamentenplans, sowie eine Einladung zur Anmeldung in der Drug-PIN Web App.

Schritt 7 – Im Falle einer Anmeldung in der Drug-PIN Web-App kann Ihr Arzt dort interaktiv Anpassungen in Ihrem Medikationsplan vornehmen und Ihre Medikation optimieren.

Sie können die Freigabe Ihrer Daten jederzeit rückgängig machen.

Schritt 1 – Hierzu gehen Sie über die Fußleiste auf die **Anzeigen** Seite.

Schritt 2 – Klicken Sie hier auf den Button **Ärztefreigabe**.


Schritt 3 – Beim gewünschten Arzt, dem Sie die Freigabe entziehen wollen, klicken Sie auf den **Löschen** button.

Schritt 4 – Wenn Sie mehren Ärzten eine Freigabe erteilt haben und Sie Ihre Freigabe mehreren Ärzten entziehen wollen, dann wiederholen Sie diesen Vorgang für alle entsprechenden Einträge.

I. MENÜ UND WEITERE FUNKTIONEN



Zusätzlich zur Übersicht und den Menüpunkten in der Fußleiste gibt es das sogenannte **Burgermenü**, das Sie überall in der App über die drei Punkte oben rechts in der Kopfzeile öffnen können. Hier können Sie diverse zusätzliche Informationen und Funktionen aufrufen.

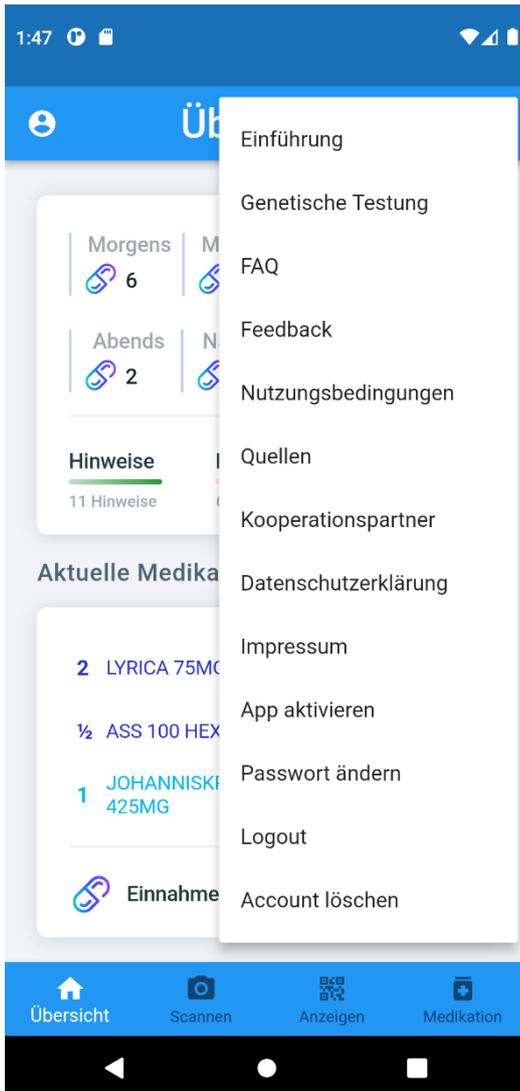

Weitere Informationen

Über die entsprechenden Menüpunkte können Sie sich hier hilfreiche und rechtliche Informationen anzeigen lassen. Dabei handelt es sich um:

Genetische Testung

FAQ

Nutzungsbedingungen

Quellen

Kooperationspartner


Datenschutzerklärung

Impressum

Außerdem können Sie über **Einführung** nochmals die Kurzeinführung ansehen, die Ihnen beim erstmaligen Anmelden in der App angezeigt wurde.

Weitere Funktionen


Neben diversen Informationen, macht das Bürgermenü auch zusätzliche Funktionen der App zugänglich.

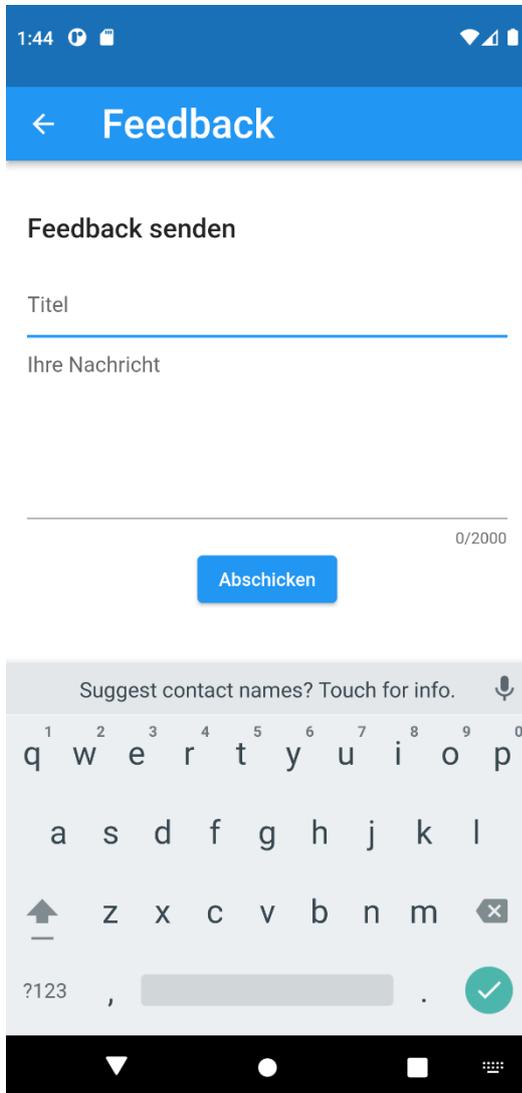

The screenshot shows the 'Feedback' screen. At the top, there is a blue header with a back arrow and the word 'Feedback'. Below the header, the text 'Feedback senden' is displayed. There are two input fields: 'Titel' and 'Ihre Nachricht'. A character count '0/2000' is visible at the bottom right of the text area. A blue button labeled 'Abschicken' is positioned below the input fields. A keyboard is overlaid on the bottom half of the screen, showing the letters 'q w e r t y u i o p' on the first row, 'a s d f g h j k l' on the second row, and 'z x c v b n m' on the third row. The keyboard also includes a search bar with 'Suggest contact names? Touch for info.', a microphone icon, and a checkmark icon.

Feedback


Über den Menüpunkt Feedback können Sie uns mitteilen, wie Ihnen die App gefällt und ob es Anpassungen gibt, die Sie sich in einer zukünftigen Version unserer App wünschen. Füllen Sie dazu einfach das aufgerufene Feedback Formular aus und klicken Sie auf **Abschicken**.

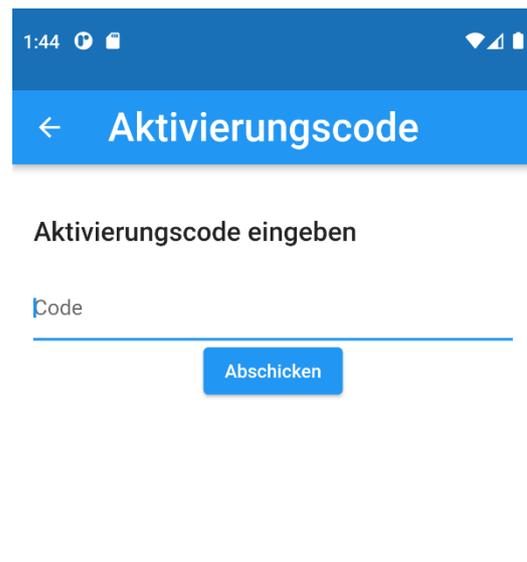

The screenshot shows the 'Aktivierungscode' screen. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text 'Aktivierungscode'. Below the header, the text 'Aktivierungscode eingeben' is displayed. There is a single input field labeled 'Code'. A blue button labeled 'Abschicken' is positioned below the input field. The bottom part of the screen shows the same keyboard as in the previous screenshot.

App aktivieren

Falls Sie Ihre App noch nicht aktiviert haben, oder Ihr Nutzungszeitraum abgelaufen ist und Sie einen neuen Aktivierungscode haben, können Sie diesen hier eingeben. (Mehr dazu unter **B. REGISTRIERUNG UND AKTIVIERUNG**)

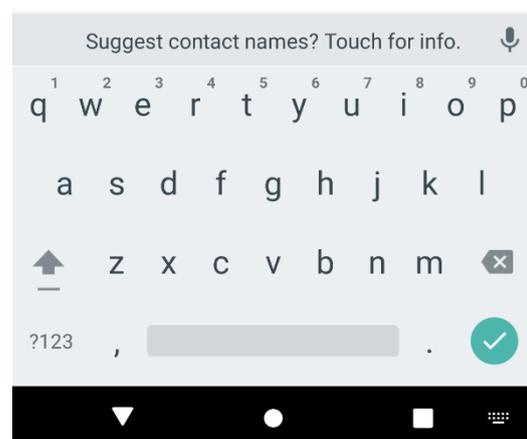

This screenshot shows a close-up of the keyboard overlay. It features a search bar at the top with the text 'Suggest contact names? Touch for info.' and a microphone icon. The keyboard layout includes the letters 'q w e r t y u i o p' on the first row, 'a s d f g h j k l' on the second row, and 'z x c v b n m' on the third row. There is also a search bar with 'Suggest contact names? Touch for info.', a microphone icon, and a checkmark icon.

Passwort ändern

Wenn Sie Ihr Passwort ändern möchten, können Sie dies über die Seite **Passwort ändern** tun, die Sie über das Burgermenü öffnen können.

Geben Sie hier ihre E-Mail-Adresse, Ihr altes Passwort, sowie Ihr neues Passwort ein und klicken Sie auf **Abschicken**.

Des Weiteren können Sie sich im Burgermenü über **Logout** in der App abmelden und über **Account löschen**, Ihren Account permanent löschen.



Achtung, wenn Sie Ihren Account löschen, können Sie sich nicht mehr in der Drug-PIN App anmelden und Ihre Daten werden nicht mehr gespeichert.

HILFE

Hilfe bei Fragen und Problemen der Nutzung der Drug-PIN App bekommen Sie auf der Supportseite unter www.drug-pin.de oder per E-Mail an support@drug-pin.de.